


<https://felicitypet.us/>

INSTRUCCIONES DE USO

1. Un momento después de que su gato use la caja de arena, compare el color de los cristales en el lugar de la micción con los colores de la tabla a continuación. El color normal, cuando se agrega orina a la arena, es de color amarillo claro a oscuro. Si se hace visible cualquier otro color, comuníquese inmediatamente con su veterinario (la arena anormalmente coloreada debe retirarse con un vaso de plástico o una cuchara).
2. Después de completar la prueba, mezcle la arena y así ayudará a eliminar los olores.
3. Los hogares con varios gatos deben separar a los gatos para que cada gato tenga su propia caja de arena con Felicity Health Control®.
4. Si su gato normalmente cava antes de orinar; no hay problema ya que Felicity Health Control® posee indicadores que se reparten de manera uniforme por toda la caja de arena.

COLORES NORMALES

IR AL VETERINARIO

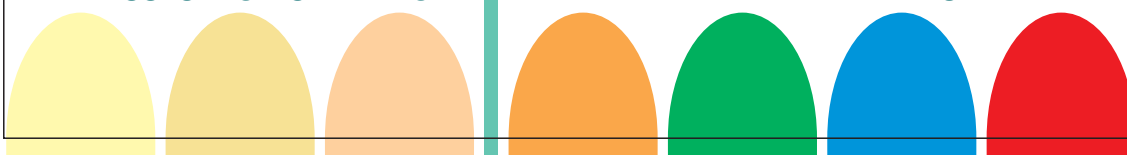

FELICITY HEALTH CONTROL®

Carta de detección 150 x 80mm

